

SureOss™

SureOss (ШуреОсс) – Порошок / Крошка кортикальной кости



SureOss (ШуреОсс)™ (Лиофилизированный костный аллотрансплантат)

На 100% состоит из лиофилизированной костной ткани (кортикальная кость).

Также препарат содержит факторы роста, прочие белки и минералы, стимулирует регенерацию костной ткани посредством остеоиндукции, с сохранением механической прочности.

Форма выпуска SureOss (ШуреОсс)™ - шприц .



Характеристики

- Высокая способность к остеокондукции
- Легкость использования (шприц)
- Отличная биосовместимость
- Минимальный срок ремодулирования костной ткани.
- Срок годности (5 лет)


Применение

- Аугментация гребня кости
- Синус лифтинг
- Пародентология
- Костная пластика перед установкой имплантата


Заводская форма выпуска

Название	Объем	Код	Размер частиц
SureOss (ШуреОсс)™ Порошок	0.25 см ³	SOP025	200~850 μm
	0.5 см ³	SOP050	
	1 см ³	SOP100	

Название	Объем	Код	Размер частиц
SureOss (ШуреОсс)™ Крошка	0.25 см ³	SOC025	850~1500 μm
	0.5 см ³	SOC050	
	1 см ³	SOC100	

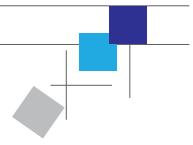

◆ Тест на Остеокондуктивность (рентгенологическое исследование крысы без тимуса спустя 12 недель после применения препарата)

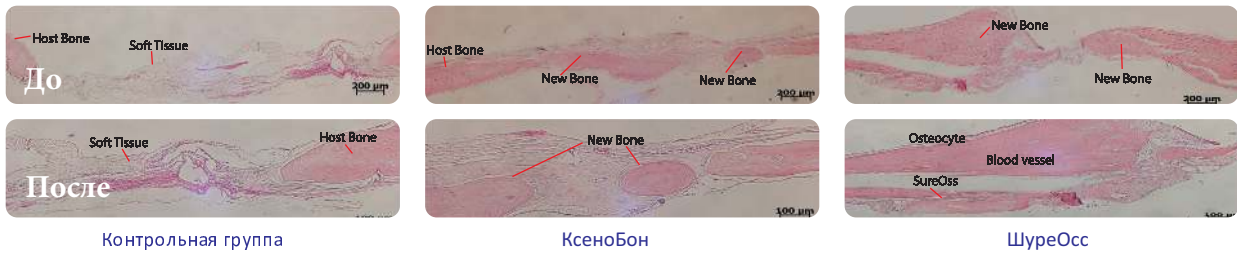

- 1) Рентгеновский снимок черепа крыс выполнен спустя 12 недель после трансплантации препарата (контрольная группа, КсеноБон и ШуреОсс). Область дефекта в группах, где применялись костные аллотрансплантаты ШуреОсс и КсеноБон, были заполнены в большей степени, чем в контрольной группе
- 2) На рентгеновских снимках в группе животных, которым вводился препарат ШуреОсс отмечено более интенсивная регенерация костной ткани, чем в других исследуемых группах.
- 3) Результаты исследования показывают, что ШуреОсс (аллогенный кортикальный порошок) обладает высокими остеоиндуктивными свойствами.

◆ Эффективность регенерации костной ткани (область дефекта костной ткани черепа белых крыс)



◆ Инструкция



1. Снять внешний колпачок (оранжевого цвета)
2. Набрать в шприц изотонический раствор (кровь) для регидротации
3. Снять колпачок (желтый цвет)
4. Внести препарат в область аугментации

Компания "Дентал Трейд"
Эксклюзивный региональный представитель
Тел. +7(964)661-76-04
info@denttrade.ru
www.denttrade.ru

